

	PEMERIKSAAN HBsAG		TERKENDALI 
	SOP	No.Dokumen : 050/SOP-UKP/2024	
		No. Revisi :-	
		Tanggal Terbit :16 Januari 2024	
		Halaman :1/1	
UPTD Puskesmas Pulau Tiga			Dina Inari M,AMK NIP.19851106 201001 2 023
1. Pengertian	Pemeriksaan HbsAg merupakan pemeriksaan darah yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan antigen virus Hepatitis B terhadap darah pasien dengan menggunakan strip test untuk melakukan pemeriksaan.		
2. Tujuan	Sebagai Acuan langkah-langkah dalam pemeriksaan HBsAg		
3. Kebijakan	SK Kepala Puskesmas No. 017 / PKM / Tentang pedoman /panduan, SOP kerangka acuan kegiatan penyelenggaraan UKP, dan laboratorium		
4. Referensi	1. Permenkes No. 37 tahun 2012 tentang penyelenggaraan laboratorium pusat Kesehatan masyarakat		
5.Prosedur/ Langkah- langkah	1. Persiapan Alat dan Bahan a. Alat Tulis b. Blood lancet c. RDT HbsAg d. Kapas Alkohol 2. Persiapan Petugas a. Analis Laboratorium 3. Langkah-langkah a. Semua alat dibiarkan berada dalam suhu ruang (10 - 30°C) sebelum digunakan b. Buka kemasan, ambil device dan tempatkan pada tempat yang datar dan bersih c. masukan 10ul darah lengkap, serum, atau plasma ke dalam sumuran d. Baca hasil dalam 15 - 20 menit e. Hasil pemeriksaan di dituliskan dalam buku resgister Pembacaan dan interpretasi hasil Garis warna akan muncul pada area control (C) dan tes (T). I. Positif Dua garis warna muncul pada area tes (T) dan kontrol (C) II. Negatif Satu garis warna muncul pada area kontrol (C). III. Invalid Tes tidak valid jika garis warna pada area kontrol (C) tidakmuncul		

UPTD Puskesmas Pulau Tiga	PELAYANAN LABORATORIUM		Dina Inari M,AMK NIP.19851106 201001 2 023
	SOP	No. Dokumen :050 /SOP-UKP/2024	
		No. Revisi :-	
		Tanggal Terbit :6 Januari 2024	
		Halaman :2/2	
6. Diagram Alir	<pre>graph LR; A([siapkan alat dan bahan]) --> B[Buka kemasan, ambil device dan tempatkan pada tempat yang datar dan bersih]; B --> C[masukan 10ul darah lengkap, serum, atau plasma ke dalam sumuran]; C --> D([Baca hasil dalam 15 - 20 menit]);</pre>		
7. Hal-hal yang perlu diperhatikan	-		
8. Unit Terkait	1. KIA 2. IGD		
9. Dokumen Terkait	-		

10. Rekam histori

No	Halaman	Yang dirubah	Perubahan	Diberlakukan tanggal
1.				
2.				

	PEMERIKSAAN HBSAG		
	DAFTAR TILIK	No. Dok :	
		No. Revisi :-	
		Tgl Terbit :	
		Halaman : 1/1	
UPTD Puskesmas Pulau Tiga			<u>Dina Inari M,AMK</u> 19851106 201001 2 023

Unit : Laboratorium
Nama :
Petugas :Tanggal Pelaksanaan :

NO	KEGIATAN	YA	TIDAK
1.	siapkan alat dan bahan		
2.	Semua alat dibiarkan berada dalam suhu ruang (10 - 30°C) sebelum digunakan		
3.	Buka kemasan, ambil device dan tempatkan pada tempatyang datar dan bersih		
4.	masukan 10ul darah lengkap, serum, atau plasma kedalam sumur		
5.	Baca hasil dalam 15 - 20 menit		
Jumlah			

Compliance rate (CR) = $\frac{YA}{YA+TIDAK} \times 100\% = \%$

Pulau Tiga,
Pelaksana/Auditor

(.....)