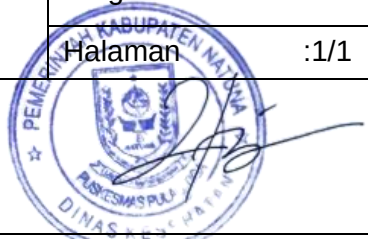


	PEMERIKSAAN HIV		TERKENDALI 
	SOP	No. Dokumen : 050/SOP-UKP/2024	
		No. Revisi :1	
		Tangaal Terbit :16 Januari 2024	
		Halaman :1/1	
UPTD Puskesmas Pulau Tiga			Dina Inari M,AMK NIP.19851106 201001 2 023
1. Pengertian	Pemeriksaan HIV adalah pemeriksaan laboratorium dengan bahan sampel darah/ serum/ plasma untuk mendeteksi virus HIV dalam darah dengan metode rapid test		
2. Tujuan	Sebagai acuan dalam penerapan langkah- langkah pemeriksaan HIV		
3. Kebijakan	SK Kepala Puskesmas No. 017/PKM/Tentang pedoman /panduan, SOP kerangka acuan kegiatan penyelenggaraan UKP, dan laboratorium		
4. Referensi	1. Permenkes No. 37 tahun 2012 tentang penyelenggaraan laboratorium pusat Kesehatan masyarakat		
5.Prosedur/ Langkah- langkah	1. Alat dan Bahan a. APD b. stik GDS c. Blood Lancet d. Kapas Alkohol 2.Persiapan Petugas a. Petugas Laboratorium 3.Langkah-langkah a. Siapkan Alat rapid test HIV dan reagen buffer dan letakan pada bidang yang datar b. Masukkan sampel serum/plasma/darah lengkap kedalam sumuran rapid test HIV sebanyak 20ul c. Tambahkan 3 tetes larutan buffer kedalam sumuran d. Baca hasil dalam 10 - 20 menit. e. Hasil pemeriksaan di tuliskan pada buku register/ blangko pemeriksaan * Pembacaan dan interpretasi hasil • Garis warna akan muncul pada area kontrol (C) dan tes (T). Positif • Dua garis warna muncul pada area tes (T) dan kontrol (C). Negatif • Satu garis warna muncul pada area kontrol (C). Invalid • Tes tidak valid jika garis warna pada area kontrol (C) tidakmuncul		

UPTD Puskesmas Pulau Tiga	PEMERIKSAAN HIV		Dina Inari M,AMK NIP. 19851106 201001 2 023
	SOP	No. Dokumen : 050/SOP-UKP/2024	
		No. Revis :-	
		Tanggal Terbit :16 Januari 2024	
		Halaman :2/2	
6. Diagram Air	Siapan Alat rapid test HIV dan reagen buffer dan letakan pada bidang yang datar Masukan Sampel serum / plasma / darah lengkap kedalam sumur darah rapid test HIV sebanyak 20ul Tambahkan 3 tetes larutan buffer kedalam sumuran Baca hasil dalam 10 - 20 menit.		
7. Hal-hal yang diprhatikan	-		
8. Unit Terkait	1. KIA 2. UGD		
9. Dokumen terkait	-		

10. Rekam histori

No	Halaman	Yang dirubah	Perubahan	Diberlakukan tanggal
1.				
2.				
3.				

	PEMERIKSAA HIV		
	DAFTAR TILIK	No. Dok :	
		No. Revisi :	
		Tgl Terbit :	
	Halaman : 1/1		
UPTD Puskesmas Pulau Tiga			<u>Dina Inari Memoriny,AMK</u> NIP.19851106 201001 2 023

Unit : Laboratorium
Nama Petugas :
Tanggal Pelaksanaan :

No	Kegiatan	Ya	Tidak
1.	Petugas menyiapkan alat dan bahan		
2.	Masukan sampel serum/plasma/darah kedalam sumuran repid test sebanyak 20ul		
3.	Tambahkan 3 tetes buffer ke dalam sumuran		
4.	Baca hasil dalam 10 - 20 menit		
5.	Hasil pemeriksaan di tuliskan pada buku register/blangko hasil pemeriksaan		
Jumlah			

Compliance rate (CR) = $\frac{YA}{YA+TIDAK} \times 100\% = \%$

Pulau Tiga,
Pelaksana/Auditor

(.....)