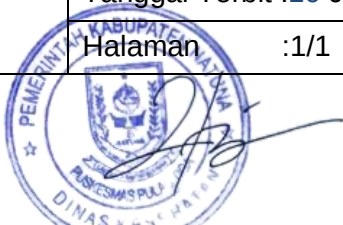
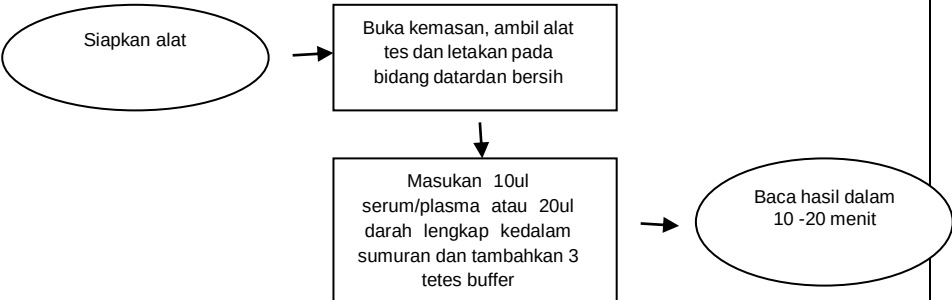


	PEMERIKSAAN SIFILIS		TERKENDALI 
	SOP	No. Dokumen :050/ SOP-UKP/2024	
		No. Revisi :1	
		Tanggal Terbit :16 Januari 2024	
			
UPTD Puskesmas Pulau Tiga			Dina Inari M,AMK NIP.19851106 201001 2 023
1. Pengertian	Pemeriksaan sifilis merupakan pemeriksaan serologi untuk mendeteksi anti body yang terbentuk setelah infeksi pemeriksaan Treponema.		
2. Tujuan	Sebagai Acuan penerapan langkah-langkah dalam penerapan pemeriksaan Sifilis		
3. Kebijakan	SK Kepala Puskesmas No. 017 / PKM / Tentang pedoman / panduan, SOP kerangka acuan kegiatan penyelenggaraan UKP, dan laboratorium		
4. Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan No 37 tahun 2012 tentang penyelenggaraan laboratorium pusat Kesehatan masyarakat		
5.Prosedur / Langkah-langkah	1. Persiapan alat dan bahan a. APD b. RDT Sifilis c. Blood lancaet 2. Persiapan Petugas a. Petugas Laboratorium 3. Langlah-langkah a. Alat disiapkan dalam suhu (20 - 30°C) sebelum digunakan b. Buka kemasan, ambil alat tes dan letakan pada bidang datar dan bersih c. Masukkan 10ul serum/plasma atau 20ul darah lengkap kedalam sumuran dan tambahkan 3 tetes buffer d. Baca hasil dalam 10 -20 menit		
6.Bagan Alir			
7.Hal-hal yang perlukan	-		
8.Unit Terkait	1. Laboratorium 2. KIA		

	PEMERIKSAAN SIFILIS		
		No. Dokumen :050 /SOP-UKP/2024	

UPTD Puskesmas Pulau Tiga	SOP	No. Revisi :1	<u>Dina Inari M,AMK</u> NIP.19851106 201001 2 023
		Tanggal Terbit :16 Januari 2024	
		Halaman :2/2	
9. Dokumen Terkait	-		

10. Rekam histori

No	Halaman	Yang dirubah	Perubahan	Diberlakukan tanggal
1.				
2.				
3.				

	PEMERIKSAAN SIFILIS		
	DAFTAR TILIK	No. Dokumen :	
		No. Revisi :	
		Tanggal Terbit:	
	Halaman : 1/1		
UPTD Puskesmas Pulau Tiga			<u>Dina Inari M,AMK</u> NIP.19851106 201001 2 023

Unit : Laboratorium
Nama Petugas :
Tanggal Pelaksanaan :

No	Kegiatan	Ya	Tidak
1.	Petugas menyiapkan alat dalam suhu (20 - 30°C) sebelum digunakan		
2.	Petugas meletakkan alat di atas bidang yang datar dan bersih		
3.	Petugas memasukan sampel dan larutan buffer ke dalam sumuran		
4.	Petugas membaca hasil dengan baik dan benar		

Compliance rate (CR) = $\frac{YA}{YA+TIDAK} \times 100\% = \dots\dots\dots\%$

Pulau Tiga,
Pelaksana/Auditor

(.....)

